

こんな機能も持っています

・ヒート表裏照合

薬品マスタに表裏それぞれの特徴を登録することで、表裏どちらでも照合が可能です。

・複数トレイでの分割照合

投薬量によりトレイが複数にならても照合が可能です。

・関連チェック機能

間違い易い錠剤を登録しておくことで鑑査時に「×」印を表示することができます。

・照合画像印刷

照合した画像を印刷することができます。
(別途プリンタが必要です。)

・約5,000薬品のマスタ画像を初期提供

初期マスタとして約5,000薬品のマスタ画像を初期提供させていただきます。

※本初期提供マスタはすべての薬品についての照合を保証するものではありません。

※提供マスタに含まれていない薬品、デザインが変更となつた薬品等は、各店舗にて登録をお願いします。

・マスタ受信機能

インターネットを介して更新 / 追加されたマスタ画像を取り込むことができます。

※追加発売された薬品、デザイン変更となった薬品のマスタをすべて保証するものではありません。

・1店舗複数台対応

1日の処方箋枚数が多い薬局様向けに、最大3台まで導入することができます。

処方箋受付情報、画像鑑査結果情報を各鑑査レンジ間で共有し、それぞれ別々の患者様のお薬を同時に鑑査することができます。

ご注意

- 多数の薬品を同時鑑査した場合、鑑査に時間がかかる場合があります。
- 数量鑑査はできません。
- 本製品は、薬剤師の調剤鑑査業務を支援する製品であり、最終鑑査を保証するものではありません。
- 調剤事故による患者様およびご使用店舗様の損害について、弊社は責任を負いかねます。

鑑査レンジは登録商標です（登録商標 第5567911号）



※NSIPSとは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携システムです。
NSIPSは社団法人福岡県薬剤師会の登録商標です。（商標登録 第5214610号）

お求め・ご相談は…

対応レセコン

会社名	レセコン名
株式会社ネグジット総研	調剤くん.com、調剤くん with
株式会社シグマソリューションズ	エリシア、パナシア2
株式会社ユニケソフトウェアリサーチ	P-CUBE
ハイブリッジ株式会社	Pharmacy Aid
株式会社EMシステムズ	Recepty、ReceptyNext
パナソニック株式会社	ファーネス
三菱電機株式会社	調剤 Melphin、調剤 Melphin/Neo
株式会社両毛システムズ	ファラオ
日立メディカルコンピュータ株式会社	Pharma-SEED
ノアメディカルシステム株式会社	NOAH
コスモシステムズ株式会社	ぶんぎょうめいと
株式会社ズー	GENNAI
株式会社モイネットシステム	ファーミー
インフォテクノ株式会社	I-Pharma II
株式会社A-システム	TRIC
株式会社システム・フォー	ファーマシーエース
I C ソリューションズ株式会社	MEDI-ECHO P

※記載のないレセコンとの連携も、隨時対応いたします。
※但し、レセコンから必要なデータが取り出せない場合やレセコン側が有料になる場合があります。

技術協力

- ・徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 竹内敏己 教授
- ・地域医療機能推進機構りづりん病院 薬剤科 阿部武由 薬剤科長

外形



外形寸法

(W) 400 mm
(D) 430 mm
(H) 430 mm

重量

約 20 kg
(パソコン、外付 HDD 含まず)

調剤ミスを未然に防ぐ電子の目！

—調剤業務の安心と安全をサポートします—



オークラ情報システム株式会社

〒763-8508 香川県丸亀市中津町1515番地

TEL:0877-56-1170 FAX:0877-56-1223


mail:jyo-kan@ois92.co.jp http://www.ois92.co.jp/

*本紙に記載されている内容は、製品改良のため、予告なしに変更することがあります。

2015年1月作成

オークラ情報システム株式会社

画像照合による錠剤鑑査システムが薬剤取り揃えミスを防止、正確・確実な鑑査をサポートします。

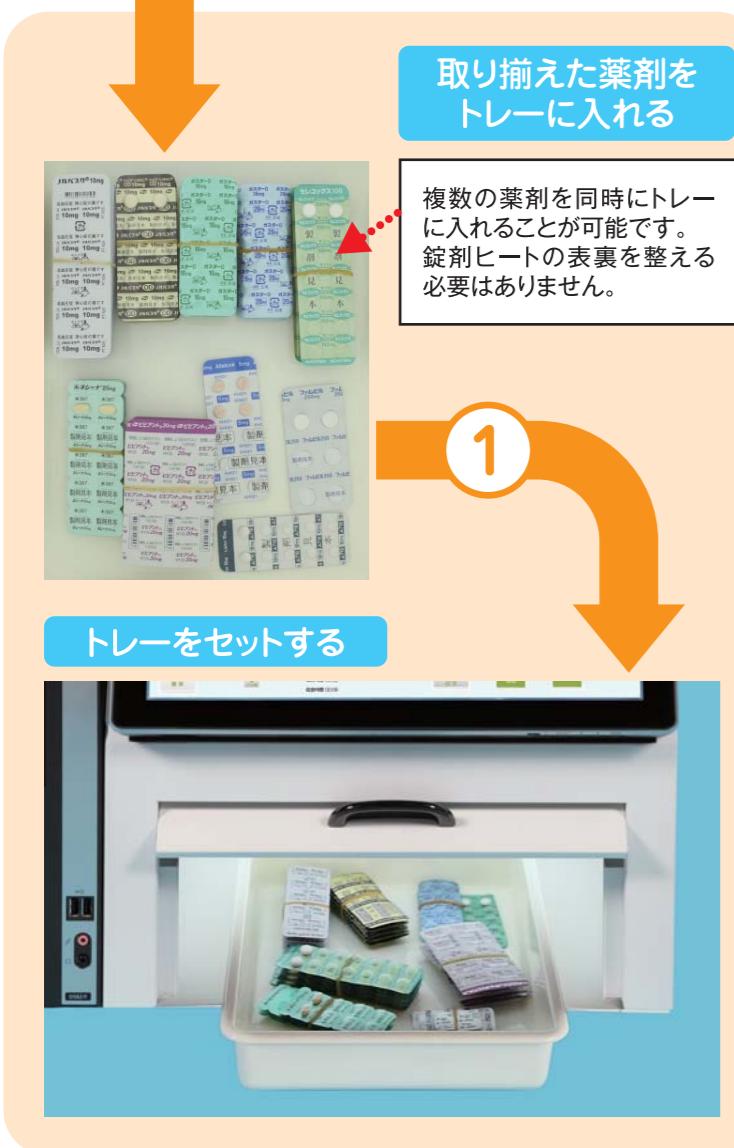

[鑑査レンジ] は、カメラで撮影した画像と薬品マスタの画像との画像照合、および撮影画像からバーコードを読み出してコードでの照合によりチェックを行う、新たな鑑査システムです。調剤時の薬剤取り揃えミスを防止し、患者さまに安全と安心をお届けします。

処方内容に含まれる薬剤の登録画像と、実際に取り揃えた薬剤を画像照合することで、薬剤が間違っていないことを、モニター上で確認できます。照合した画像は記録され、あとで再確認することができます。類似薬剤や規格違いなどの人の思い込みによるミスを排除し、より安全で確実な調剤をサポートします。

簡単

操作は3つ!

- ①取り揃えた薬剤トレイをセット
- ②受付一覧画面から患者をタッチ
- ③「鑑査」ボタンをタッチ

安全

画像およびバーコードでの照合で取り揃えミスを未然に防止。

安心

鑑査結果の画像を保存。

後日、患者さまからの問合せがあったときは画像を見ながら対応することができます。

撮影&鑑査


撮影画像内のバーコードを一括で読み取り、処方箋データと照合します。

カメラでトレー内を撮影し、処方箋データと画像照合された薬剤が一致すれば、鑑査結果として結果欄に「OK」と表示され、撮影画像に「○」が表示されま

3

鑑査ボタンをタッチ

照会

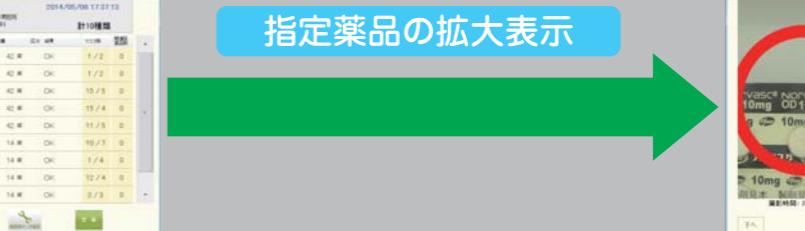

鑑査結果一覧から保存している鑑査情報を照会することができます。また、鑑査結果一覧の並び替え、検索絞り込みも可能です。

鑑査結果一覧

見たい鑑査結果を選択

指定薬品の拡大表示